



PFLEGEHINWEISE

DENTO-DORM® BEHANDLUNGSTISCHMATRATZE

Damit Sie Ihre **DENTO-DORM®** Behandlungstischmatratze viele Jahre funktionstüchtig erhalten, möchten wir Ihnen einige Tipps zur Pflege und Reinigung geben:

Ihre **DENTO-DORM®** Behandlungstischmatratze besteht aus einem kautschukhaltigen Bezug mit Schaumstoffkern. Die Oberfläche ist stich-, kratz- und Lösungsmittelbeständig, sowie abwaschbar. Sie ist mit handelsüblichen Oberflächendesinfektionsmittel (keine Händedesinfektionsmittel) desinfizierbar.

Wir empfehlen für die tägliche Reinigung das Abwischen mit einem feuchten Lappen, sowie die anschließende Sprühdesinfektion mit einem herkömmlichen Oberflächendesinfektionsmittel. Die **DENTO-DORM®** Behandlungstischmatratze ist beidseitig verwendbar. Um den Oberflächenglanz des Bezuges zu erhalten, empfehlen wir sie von Zeit zu Zeit mit einem ölhaltigen Tuch (z.B. Olivenöl) zu pflegen.

Bei Anwendung von antiparasitären Spot-On Präparaten empfehlen wir die Behandlungstischmatratze abzudecken. Hierbei kann es zu Reaktionen mit der Oberfläche kommen, was unschön aussieht (weiße Flecken), jedoch keine Beeinträchtigung der Materialeigenschaft darstellt.

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Arbeiten mit ihrer **DENTO-DORM®** Behandlungstischmatratze.

Ihr **DENTO-DORM®** Team.