

PFLEGEHINWEISE

DENTO-DORM[®] KÄFIGMATRATZE


Damit Sie Ihre **DENTO-DORM**[®] Käfigmatratze viele Jahre funktionstüchtig erhalten, möchten wir Ihnen einige Tipps zur Pflege und Reinigung geben:

Ihre **DENTO-DORM**[®] Käfigmatratze besteht aus einem PVC-Bezug mit einem zweischichtigen Matratzenkern aus Hart- und Weichschaum, sowie 100% wasserdicht verschweissten Nähten. Die Oberfläche ist kratzfest und lösungsmittelbeständig, sowie abwaschbar (auch mit dem Hochdruckreiniger). Sie ist mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfizierbar.

Wir empfehlen für die tägliche Reinigung das Abwischen mit einem feuchten Lappen, sowie die anschließende Sprühdesinfektion mit einem herkömmlichen Oberflächendesinfektionsmittel.

Die **DENTO-DORM**[®] Käfigmatratze hat zwei funktionell unterschiedliche Oberflächen:

- Die hellgraue Seite ist angenehm weich und bietet einen optimalen Schlafkomfort für liegende Patienten.
- Die grüne Seite besteht aus einem festeren Material und eignet sich für Patienten, die sich im Käfig bewegen, hat aber dennoch den positiven Effekt einer gemütlichen, wärmespeichernden Schlafmatratze.

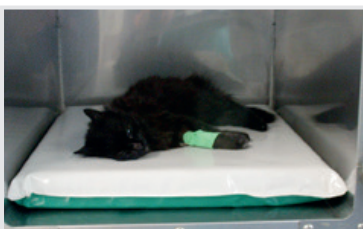

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Arbeiten mit Ihrer **DENTO-DORM**[®] Käfigmatratze.

Ihr **DENTO-DORM**[®] Team.