



PFLEGEHINWEISE

DENTO-DORM® KOPFLAGER

Damit Sie Ihre **DENTO-DORM®** Kopflager viele Jahre funktionstüchtig erhalten, möchten wir Ihnen einige Tipps zur Pflege und Reinigung geben:

Ihre **DENTO-DORM®** Kopflager bestehen aus einem Polyethylen mit einer thermisch versiegelten Oberfläche. Das Material ist robuster als herkömmlicher Schaumstoff und wird ohne Lösungsmittel produziert. Der Kern der **DENTO-DORM®** Kopflager ist absolut wasserfest.

Wir empfehlen daher für die tägliche Reinigung das Abwischen mit einem feuchten Lappen oder die Reinigung unter fließendem Wasser, sowie die anschließende Sprühdesinfektion mit einem herkömmlichen Oberflächendesinfektionsmittel. Danach sollten die **DENTO-DORM®** Kopflager an einem trockenen Ort aufbewahrt werden.

Anhaftende Tierhaare werden am Besten mit der oben erwähnten Reinigung entfernt. Bitte benutzen Sie keine Bürste oder Kleberollen, um die versiegelte Oberfläche nicht unnötig zu strapazieren.

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Arbeiten mit Ihrem **DENTO-DORM®** Kopflager.

Ihr **DENTO-DORM®** Team.